



Rollz Motion Rhythm rollator

Denna rollator är utformad för personer med neurologiska sjukdomar, såsom Parkinsons sjukdom. Den är utrustad med funktioner som ger olika typer av stimuli för att hjälpa användaren att starta gång, upprätthålla en jämn gångrytm och ta efterföljande steg.

Rollatorns stabilitet minskar risken för fall på grund av balansproblem. Den använder signaler som kan bryta frysings- eller festinationsmönster (okontrollerat snabb gång).

Till exempel kan en projicerad laserlinje bryta frysingsmönster, medan en

metronom eller vibration i handtagen kan hjälpa till att behålla en jämn gångrytm.

Parkinson drabbar människor olika och det är därför viktigt att rollatorn kan anpassas individuellt. De tre signalerna på Parkinson-rollatorn kan kombineras på olika sätt och aktiveras eller inaktiveras efter behov. Varje signal kan justeras efter specifika behov vad gäller hastighet, intensitet och varaktighet.

På så vis kan varje person med Parkinsons sjukdom använda rollatorn i sitt eget tempo och rytm.



Rollz Motion Rhythm

Beskrivning	Art.nr
RM Rhythm svart 1 laser	2015RM0001
RM Rhythm Svart Rev.Brake	2015RM0003
RM Rhythm Svart Slow Down	2015RM0004
RM Rhythm Svart Small 1 laser	2016RM0001

Standardutrustning:

- Justerbara handtag och fotstöd
- justerbart och vadderat ryggstöd
- Vändbara handtag
- Laserlinje
- Vibration
- Metronom (ljud)

Specifikationer

Beskrivning	Rollz Motion Ryhtym
Totalvikt rollator	12,2 kg
Vikt rullstolskit	3,4 kg
Användarhöjd	160-190 cm
Höjd sits	55 cm
Max belastning	125 kg
Bredd x längd	67x63 cm
Bredd hopfälld	31 cm
Justerbar höjd	87-98 cm
Bredd ihopfälld	44 cm

Tillbehör

Beskrivning	Art.nr
Reseskydd	1020RM0010
Rollz 3-1 kryckhållare, handtag-skrok, fäste för rullstolspaket	2030RM0049
Bag	1020RM0004
Ljus	1020RM0027
Kopphållare	1020RM0002
Bord	1020RA0001
Ryggstöd	1020RM0012
Paraply	1020RM0019
Säkerhetsbälte	1020RM0018
Säkerhetsbälte	1020RM0018